

Wkładka do Zestawu użytku osobistego


Zapoznać się dokładnie ze wszystkimi wskazówkami we wkładce przed pobranie próbki.
Wyniki testów mogą być nieważne, jeśli test nie został wykonany właściwie.

Pojemnik na próbkę


1. Umieścić dostarczony papier do pobierania wewnątrz muszli toaletowej na wodzie.
2. Umieścić próbkę stolca na papierze do pobierania.
3. Pobrać próbkę stolca zanim papier zatonie, a próbka stolca dotknie wody.
4. Spuścić wodę. Papier do pobierania jest biodegradowalny i nie uszkodzi systemów kanalizacyjnych.

Pobieranie próbki

1. Uzpełnić wszystkie niezbędne informacje na butelce do pobierania próbek.

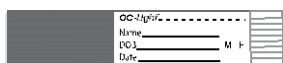

Otworzyć zieloną zatyczkę poprzez przekroczenie i uniesienie.

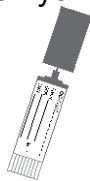

2. Zeskrobać powierzchnię próbki stolca za pomocą próbnika próbki.



Wyłobioną część próbnika próbki pokryć dokładnie próbką stolca.



3. Zamknąć butelkę do pobierania próbek poprzez włożenie próbnika próbki i dokładne zatrzęsnięcie zielonej zatyczki. Nie otwierać ponownie.



Zwrócić butelkę na próbki do lekarza lub laboratorium w załączonej kopercie. Nie wysyłać do Polymedco.

